

Bowie & Dick Test 134°C/3,5 min

Täglicher Funktionstest für Dampfsterilisatoren nach DIN EN 285 und DIN EN 13060

Entspricht DIN EN ISO 11140-1 (Klasse2) und DIN EN ISO 11140-4

Verwendungszweck

Gebrauchsfertiges, bleifreies Einmaltestpaket für den täglichen Bowie & Dick Test 134°C / 3,5 Min. Täglicher Funktionstest (entsprechend DIN EN ISO 17665 - früher DIN EN 554)

Produkt	Best.- Nr.	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
Bowie & Dick Test	521015	15 Stück	Trocken bei Raumtemperatur	2 Jahre ab Herstellungsdatum


Anwendung / Durchführung




Bowie & Dick Test in die leere Sterilisatorenkammer legen. Test durchführen (Bowie & Dick Test Programm 134°C / 3,5 min. starten). Nach Beendigung des Zyklus den Bowie & Dick Test aus der Sterilisatorenkammer nehmen. Indikatorbogen am Überstand fassen und herausziehen. Indikatorbogen auf Farbumschlag prüfen.

Auswertung


Indikatorbogen auf Farbumschlag prüfen. Hierzu ist KEINE Farbkarte notwendig. Durch den Sterilisationsprozess gebildet Referenz (Überstand) mit dem Indikatorfeld vergleichen

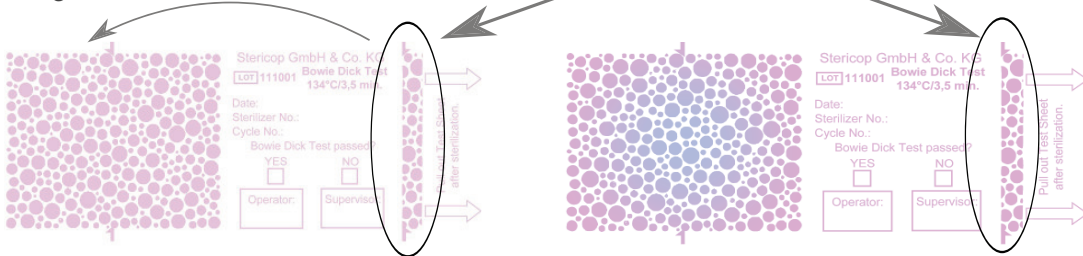

Testbedingungen erfüllt:
Einheitlicher Farbumschlag nach pink

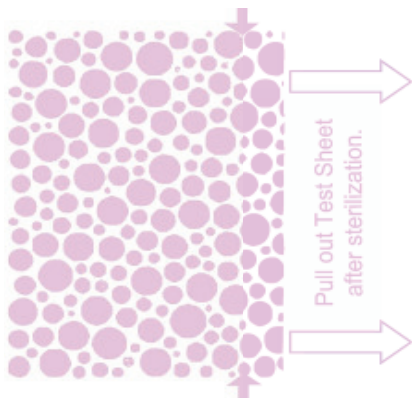

Testbedingungen nicht erfüllt:
Kein einheitlicher Farbumschlag nach pink.

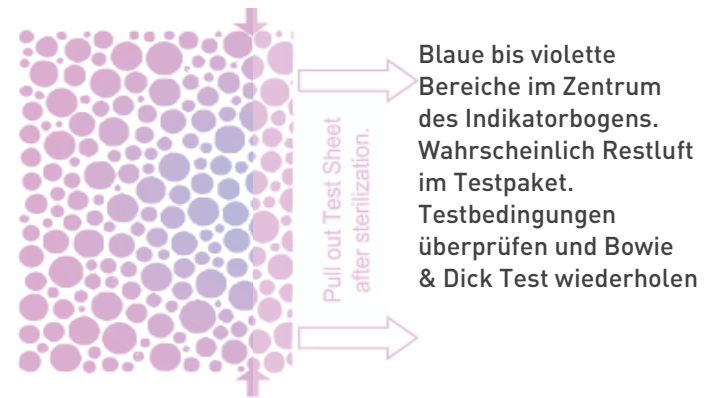

Blaue bis violette Bereiche im Zentrum des Indikatorbogens. Wahrscheinlich Restluft im Testpaket. Testbedingungen überprüfen und Bowie & Dick Test wiederholen