

# SteamSensor S

Spezielles chemisches Indikatorsystem zur Überwachung der Dampfsterilisation in Autoklaven mit N- und S-Programmen



## »» Verwendungszweck

Indikatorsystem nach DIN EN ISO 11140-1 Klasse 5 zur Überwachung der Sterilisationszyklen N und S (z.B. DAC Universal, Statim-Kassettenautoklaven, Euroklav, Schnellprogramme)



Produkt	Best.-Nr.	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
Steam Sensor S	212002	200 Stück	Dunkel, trocken bei Raumtemperatur	2 Jahre ab Herstellungsdatum

## »» Anwendung/Durchführung

Den SteamSensor S zur Beladung in die Sterilisationskammer legen bzw. In die entsprechende Halterung einklemmen (DAC Universal). Den Sterilisationszyklus starten. Nach Beendigung des Sterilisationszyklus den SteamSensor S herausnehmen.

## »» Auswertung

Den Farbumschlag des Indikators anhand der Farbkarte (Innenseite Verpackung) prüfen.

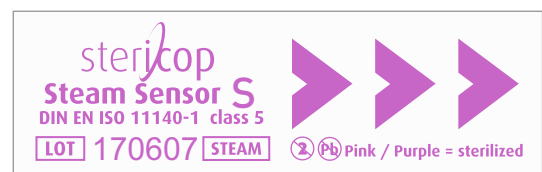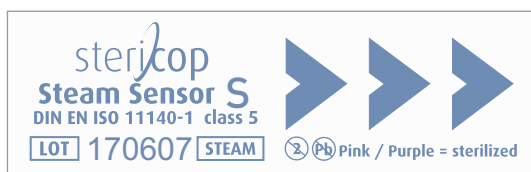

## »» Dokumentation

Indikator auswerten und das Ergebnis in das Sterilisationsbuch (Best.-Nr. 810001) eintragen, den Indikator verwerfen.