

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

Unser Bestseller –
jetzt nachhaltig.

Bacillol® 30 Sensitive
Tissues



plastikfreie
100%
Tücher

from
renewable
sources

100%
plastic free
tissues

green
tissues
Bacillol®
30 Sensitive Tissues

Alcoholic cleaning and disinfection wipes

120

Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen.
VERWENDUNG: Zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.
WICHTIG: Nicht für die Desinfektion von Händen geeignet.
ALCOHOLISCHE REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG: Bacillol 30 Sensitive Tissues sind alkoholisch getränkte Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen. Sie sind nicht für die Desinfektion von Händen geeignet. Die Tücher sind mit einem hohen Anteil an Ethanol (60-70%) getränkt und enthalten auch Wasser und Duftstoffe. Bitte beachten Sie, dass die Tücher nicht für die Desinfektion von Händen geeignet sind. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
GERÄTREINIGUNG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen. Bacillol 30 Sensitive Tissues sind für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen geeignet. Bitte beachten Sie, dass die Tücher nicht für die Desinfektion von Händen geeignet sind. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Effektiv und schonend wie immer –
die neuen Bacillol® 30 Sensitive
Green Tissues



Gleiche
Leistung –
jetzt mit
nachhaltigen
Tüchern

Bewährte Leistung der Bacillol® 30 Sensitive Tissues

+ Optimale Wirksamkeit

- Bakterizid und levurozid in 1 Minute
- Wirksam gegen Noroviren in 2 Minuten
- Getestet unter hoher organischer Belastung –
reinigen und desinfizieren in einem Schritt

+ Hohe Materialverträglichkeit

- Für empfindliche Oberflächen
- Für Displays, Tastaturen, Handys, Tablets
- Für empfindliche, nicht invasive Medizinprodukte
geeignet

+ Einfach und sicher in der Anwendung





- Sehr gutes Rückstandsverhalten
- Hautverträglich und Allergiker freundlich
(ECARF-zertifiziert)
- Ohne Handschuhe anwendbar¹

¹ Wenn Infektionskontrolle und Arbeitsschutzprotokolle es zulassen.

Unser Bestseller – jetzt mit 100 % plastikfreien Tüchern

Die verbesserten **Bacillo® 30 Sensitive Tissues** gehen einen wichtigen Schritt in Richtung Umweltschutz – mit „**Green Tissues**“! Die Desinfektionstücher sind zu 100 % plastikfrei und werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues – Produktvorteile:

-  100 % plastikfreies Tuchmaterial
-  Hergestellt mit Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
-  25 % geringerer CO₂-Fußabdruck als PET-Tücher
-  Faserrückstände auf gleichem Niveau wie PET-Tücher
-  Hohe Reißfestigkeit



Bacillo[®] 30 Sensitive Tissues



Materialschonende Reinigungs-
und Desinfektionstücher
für empfindliche Oberflächen



100 % plastikfreie Tücher –
aus nachwachsenden Rohstoffen



Optimale Wirksamkeit –
schnelle und zeitsparende Anwendung



Materialverträglich –
geeignet für empfindliche Oberflächen



Reichweitenstark –
1,5 m² Reichweite pro Tuch (17 x 20 cm)
2 m² Reichweite pro XL-Tuch (20 x 30 cm)
1 m² Reichweite pro Tuch (18 x 20 cm)



Gute Reinigungsleistung



**Hautverträglich und Allergiker freundlich
(ECARF-zertifiziert) –** kann ohne Handschuhe
verwendet werden¹

Bacillo[®] 30 Sensitive Tissues



- + 100 % plastikfreie Desinfektionstücher aus nachwachsenden Rohstoffen
- + Bewährt anwenderfreundlich – wirksame, schnelle und materialschonende Flächendesinfektion



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Telefon: +49-7321-36-0
Telefax: +49-7321-36-3636
info@hartmann.info
www.hartmann.info

(05.25)

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / levurozid	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	hoch	1 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348	hoch	3 Min.
Viren			
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hoch	30 Min.
Norovirus	EN 14476	hoch	2 Min.
Rotavirus	EN 14476	gering	1 Min.
Lebensmittel / Industrie			
Bakterizid / levurozid	EN 13697	gering / hoch (20 °C)	1 Min.

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Bacillo[®] 30 Sensitive Green Tissues	120 Tücher Größe 17 x 20 cm	981 943	18851738	6
Bacillo[®] 30 Sensitive Green Tissues XL	80 Tücher Größe 20 x 30 cm	982 029	19636172	6
Bacillo[®] 30 Sensitive Green Tissues Big Pack	160 Tücher Größe 18 x 20 cm	981 983	19262139	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	09397045	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	-	10

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Erfahren Sie mehr unter:
plhn.de/b30sgtFD