

# Meliseptol®

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel ohne Zusatzwirkstoffe



Hygiene

**NEW  
FORMULA**

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Meliseptol® – alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel ohne Zusatzwirkstoffe

## Eigenschaften

- Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen
- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Neue Rezeptur mit breitem Wirkungsspektrum und kürzerer Einwirkzeit
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Adeno- und Noroviren
- Ohne zusätzliche Wirkstoffe wie z. B. QAV, Amine oder Aldehyde
- Einwirkzeit: 1 Minute
- Als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste



**NEW  
FORMULA**

## Hinweise zur Anwendung und Dosierung

Meliseptol® auf ein Einmaltuch gießen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mithilfe der Sprühflasche einsprühen und mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden. Alkoholempfindliche Materialien (z. B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol® prüfen.

| Lieferform                    | Art.-Nr. | PZN      |
|-------------------------------|----------|----------|
| 250 ml-Sprühflasche           | 19763    | 10966123 |
| 250 ml-Dosierflasche          | 19762    | 10966146 |
| 1000 ml-Handsprühflasche*     | 19764    | 10966152 |
| 1000 ml-Flasche               | 19761    | 10966169 |
| 5 Liter-Kanister              | 19758    | 10966175 |
| Sprühkopf für 1000 ml-Flasche | 6510094  | 02182034 |
| Auslaufhahn 5 Liter-Kanister  | 3908208  | 03393968 |

\* Sprühkopf bitte zusätzlich bestellen

### Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: klare Flüssigkeit  
Geruch: angenehm  
Flammpunkt: +23 °C ± 1 °C nach DIN 51755  
Dichte: ca. 0,93 g/ml

Hinweis: Desinfektionsmittel sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten (EZ)

| Einsatzgebiet                          | EZ      |
|--|---------|
| Flächendesinfektion gemäß DGHM/VAH     |         |
| bakterizid/levurozid                   | 1 Min.* |
| tuberkulozid                           | 1 Min.  |
| mykobakterizid                         | 1 Min.  |
| begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) | 30 Sek. |
| Rotaviren                              | 30 Sek. |
| Adenoviren                             | 30 Sek. |
| Noroviren**                            | 30 Sek. |

\* Der kürzestmögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.

\*\* Surrogatvirus MNV

### Meliseptol® – Auszug aus den Produktinformationen

100 g enthalten: Ethanol 44,0 g. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5% amphotere Tenside, Parfum. Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Einatmen von Dampf vermeiden. Die Berufsgenossenschaft schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Schutzhandschuhen vor. Ausbringung max. 50 ml/m<sup>2</sup>.