



DERMABOND
MINI

TOPISCHER HAUTKLEBER 2-Octyl Cyanoacrylat


**Der innovative
Hautkleber**

DERMABOND mini


*Kleine Wunden
schnell versorgt*

ETHICON
a *Johnson & Johnson* company


Anwendungsinformationen

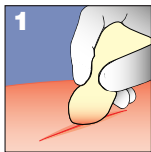


Zunächst wird die **Blutung gestillt** und die **Wunde sorgfältig gereinigt**. Nach **Trocknung der Haut** können die **Wundränder adaptiert** werden. Die Wunde wird **horizontal ausgerichtet**.

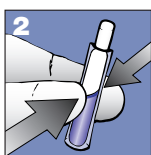


Nehmen Sie den sterilen DERMABOND Applikator aus der Packung. Halten Sie dabei den **Applikator senkrecht** mit der Spitze nach oben. **Drücken** Sie den Kunststoffkorpus in der Mitte soweit zusammen, dass die gläserne Ampulle im Inneren des Applikators zerbricht.

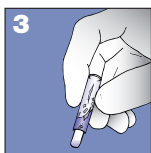

Drehen Sie die **Applikatorspitze nach unten**. Die violette DERMABOND Flüssigkeit fließt sichtbar **in die Spitze** und lässt sich gleichmäßig auftragen.

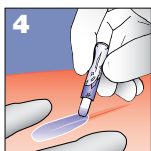

Behalten Sie einen **leichten Druck** auf den Applikator bei, während Sie eine dünne DERMABOND Schicht mittels Applikatorspitze mittlang der adaptierten Wundränder **auftragen**.

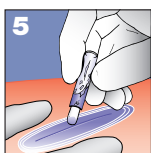

Innerhalb der folgenden **15 Sekunden** ist eine **Wundrandkorrektur** nach Abwischen des Klebers leicht durchzuführen. Tragen Sie bei DERMABOND mini insgesamt **zwei Schichten** auf, indem Sie die gerade aufgetragene Schicht einige Sekunden trocknen lassen und dann den Vorgang wiederholen. **Halten** Sie die Wundrandadaption etwa **1 Minute lang in Position**. Dann hat sich DERMABOND zu einer haltbaren, elastischen Verbindung verhärtet.

Epidermale Wunden können ohne Naht und ohne Lokalanästhesie schnell und einfach geschlossen werden.

DERMABOND hat sich als oberflächlicher Verschluss von chirurgischen Schnitten bewährt, bei denen tiefere Gewebeschnitte mit resorbierbarem Nahtmaterial subkutan adaptiert werden.

Das Produkt

DERMABOND ist ein bewährter Hautkleber aus 2-Octyl-Cyanoacrylat, der einen unkomplizierten und sicheren Wundverschluss ermöglicht.

Durch seine einzigartige chemische Zusammensetzung und die Konstruktion des Applikators hat DERMABOND mini folgende positive Eigenschaften:

- Vom ersten Tag an sicher adaptierte Wundränder.
- Einfaches und genaues Auftragen auf die Wundränder möglich.

- Definierter Aushärtungsprozess des Klebers.

In den ersten Sekunden sind ein Abwischen des DERMABOND Films und somit eine Korrektur der Wundränder und das erneute Applizieren von DERMABOND möglich.

- Mikrobielle Barriere.
- Keine Kühlung erforderlich.

Reduzierte Behandlungskosten

Im Durchschnitt liegen die Kosten bei der Behandlung von oberflächlichen Hautverletzungen mit DERMABOND deutlich unter dem Niveau konventioneller Wundverschluss-Methoden. Die Behandlungszeit wird erheblich verkürzt.

Wundverbände, Lokalanästhetika und Instrumenten-Sterilisationen können beispielsweise eingespart werden.

Zudem entfällt die Notwendigkeit eines zweiten Termins zum Fädenziehen.

Beachten Sie bitte die Gebrauchsinformationen

www.dermabond.de

STECKBRIEF : DERMABOND mini

- Material: 2-Octyl-Cyanoacrylat
Farbe: violett-transparent
- Sicherer, schneller und angenehmer Wundverschluss
 - Zum Wundverschluss oberflächlicher Hautschnitte und -risse bis zu einer Länge von 3-5 cm
 - Minimale Vorbereitungszeit
 - Keine Notwendigkeit der Lokalanästhesie
 - Wundrandkorrekturen innerhalb der ersten Sekunden nach Abwischen des Films möglich
 - Hoher Patientenkomfort
 - Resistent gegen kurzzeitige Feuchtigkeit (Duschen)
 - Hohe Festigkeit
 - 2-Lagen-Applikation
 - Mikrobielle Barriere

Angenehm für Ihre Patienten

DERMABOND reduziert die Ängste und Schmerzen der Patienten, die im Zusammenhang mit Injektionen, der Verwendung von Hautnähten und dem Fädenziehen entstehen können.

Der elastische DERMABOND Film erhält die größtmögliche Bewegungsfreiheit des Patienten.

Der DERMABOND Wundverschluss macht den Einsatz von Verbänden und Heftpflastern überflüssig. Der Heilungsprozess vollzieht sich unter dem DERMABOND Film wie unter einer organischen Schorfschicht. Nach Wundheilung löst sich der DERMABOND Film von selbst ab (5-10 Tage).

Der DERMABOND Wundverschluss darf kurzzeitig befeuchtet werden. Patienten können deshalb sogar duschen oder die Wundumgebung vorsichtig waschen.

LIEFERUMFANG

Bestell-Nr.	Verpackungseinheit
AHVM 12	12 Ampullen/Verpackung 0,25 ml/Ampulle