

DESTAsept® SW clean

Schnelldesinfektion



Auf einen Blick:

- ✓ Ideal für die sichere Desinfektion in der Routine
- ✓ Umfassende, schnelle Wirksamkeit
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit

Alkoholisches
Schnelldesinfektionsmittel

Freigegeben für
Zentrifugen von
HETTICH

CE 0481

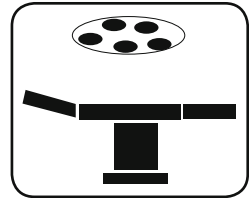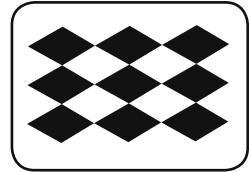

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 s	1 min	2 min	3 min	5 min
Bakterien und Hefen							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung			•		
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•			
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	•				
mykobakterizid (M. avium)	EN 14348	niedrige Belastung		•			
Viren							
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung				•	
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung	•				
	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•				
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	•				
wirksam gegen Vacciniaviren	prEN 16777	niedrige Belastung		•			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung				•	
	prEN 16777	niedrige Belastung				•	
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		•			
	prEN 16777	hohe Belastung	•				
	prEN 16777	niedrige Belastung				•	

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Anwendung:

Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

VAH
gelistet



Hersteller/Manufacturer

Dometra
GmbH & Co. KG

Auf Pfulst 1, D-66589 Merchweiler
+49 (0)6825 - 8019956

DESTAsept® SW clean

Schnelldesinfektion

Anwendungshinweise:

DESTAsept® SW clean kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, da HACCP konform.

Weitere Einsatzmöglichkeit: **DESTAsept® SW clean** eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vlies-tuchspendersystemen wie z. B. DESTAsept® VTS eco mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 28 Tagen.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

	Physikalisch-Chemische Daten
pH-Wert	ca. 6,5
Dichte (20°C)	ca. 0,92
Aussehen	klar, farblos

Gutachten:

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet.


Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

DESTAsept® SW clean – Gebindegrößen und Zubehör		
Artikel	Art.-Nr.	PZN
1000 ml Flasche	4893041	10088734
5 L Kanister	4893042	10088740
Auslaufhahn für 5 L Kanister	4862058	
Kanisterschlüssel für 5 L Kanister	4862059	
Sprühkopf für 1000 ml Flasche	4862061	

 Hersteller/Manufacturer


Dometra
GmbH & Co. KG

Auf Pfuhlst 1, D-66589 Merchweiler
+49 (0)6825 - 8019956