



FLÄCHEN-  
DESINFIZIATIONSMITTEL

# Lysoform®

Desinfektion von Flächen, Inventar  
und Medizinprodukten

Désinfection des surfaces, de l'èquipement  
et des dispositifs médicaux



CE 0482

# Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

## Lysoform®

Wirkstoff: Formaldehyde  
Nur für gewerbliche Anwender

## ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: 7,5 g Formaldehyde, Natrium alkyl ether sulphate

## ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Abtötung von Mikroben, die Krankheiten, Verderbnis, Fäulnis und/ oder Gerüche erzeugen.

- Flächen-, Inventar- und Wäschedesinfektion
- Seuchenbekämpfung

## GEGENANZEIGEN

Allergie gegen Formaldehyd

## ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Nur mit Wasser verdünnt anwenden!  
Nach Entnahme der notwendigen Menge von **Lysoform®**-Konzentrat Behältnis sofort wieder verschließen!

## Flächen- und Inventardesinfektion mit Reinigung:

Flächen und Gegenstände mit einer 1%igen **Lysoform®**-Lösung nass abwischen, 4 Std. einwirken lassen.

## Wäsche-Desinfektion:

Wäsche in 2%iger **Lysoform®**-Lösung während 4 Std. einweichen.

## Viruzid inkl. HBV/HCV/HIV

Scheuerdesinfektion im Seuchenfall  
gem. RKI-Liste (A, B) 5,0 % - 6 Std.

## Dosierbeispiel:

1 Liter Wasser und 10 ml **Lysoform®** = 1% Lösung.

## WARN- UND LAGERHINWEISE

- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern!
- Beim Umgang mit dem unverdünnten Präparat geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

## EIGENSCHAFTEN

- Desinfektion und Reinigung hautpilzkontaminierter Fußböden und Gegenstände (Badematten und -roste, Schuhe, Strümpfe u. a.)
- Wäsche- und Textil-Desinfektion (inkl. Tbc), Desinfektion für Klinik, ärztliche Praxis und hygienische Sauberhaltung aller sanitären Einrichtungen, z. B. Toiletten und Baderäume
- biologisch abbaubar

## BESONDERE HINWEISE

- Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch Falls das **konzentrierte** Präparat in Kontakt mit Schleimhäuten (z. B. Rachen, Magen, etc.) gekommen ist, im Falle von Augen auch bei verdünntem Präparat, sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Falls **Lysoform®** eingenommen worden ist: zur Verdünnung des Präparates sofort reichlich Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen! Patienten nicht erbrechen lassen, da Verätzungen im Speiserohr entstehen können.
- Keine Waschmittel bzw. Haushaltsreiniger zumischen, weil dadurch die Wirkung beeinträchtigt werden könnte.
- Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## VERSANDEINHEIT/PACKUNG

	Art.-Nr.
20 x 500 ml-Flasche	6545
12 x 1 Liter-Flasche	6566
2 x 5 Liter-Kanister	6444

## Zubehör

Dosierpumpe für 5 Liter-Kanister (1 Hub = 20 ml)	3135
--	------

# Mode d'emploi

Lire attentivement avant l'utilisation!

## Lysoform®

Principe actif: formaldéhyde  
Réservé aux utilisateurs professionnels

## COMPOSITION

100 g de solution contiennent: 7,5 g de formaldéhyde, sodium alkyl ether sulphate

## DOMAINES D'APPLICATION

Destruction des micro-organismes qui sont la cause de maladie, putréfaction, pourriture et mauvaises odeurs

- désinfection des surfaces, de l'équipement et du linge
- désinfection en cas d'épidémies

## CONTRE INDICATIONS

Allergie au formaldéhyde

## MODE D'UTILISATION / DOSAGE

Utilisation externe et en dilutions aqueuses seulement! Refermer le flacon immédiatement après en avoir pris la quantité nécessaire.

## Désinfection et nettoyage des surfaces et du mobilier:

Laver avec une solution de **Lysoform®** à 1%, laisser agir pendant 4 heures.

## Désinfection du linge:

Laisser tremper le linge dans une solution à 2% pendant 4 heures.

## Virucide\* y compris contre l'hépatite B et le SIDA (HBV/HIV/HCV)

\*conf. aux recommandations du Robert-Koch-Institut Allemand (BG-Blatt 01/2004)

## Désinfection par frottage en cas d'épidémie

conf. a la liste officielle du Robert-Koch-Institut allemand (catég. A, B): 5,0% - 6 heures

## Exemple de dosage:

1 litre d'eau et 10 ml de **Lysoform®** solution à 1%

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Désinfectant. Conserver au sec et au frais, mais à l'abri du gel, dans un endroit bien ventilé et hors de la portée des enfants!
- Porter des gants de protection pendant la manipulation du concentré.
- Ne plus utiliser au-delà de la date de péremption.

## PROPRIÉTÉS

- Désinfection et nettoyage des sols et objets contaminés par les levures responsables des mycoses des pieds (nattes, sorties de bain, chaussures, socquettes etc),
- Désinfection du linge et des textiles (BK inclus), désinfection de l'équipement clinique et du cabinet médical ; entretien hygiénique de toutes les installations sanitaires par ex des toilettes et des salles de bains,
- Biologiquement dégradable.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Contre-mesures en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant: Au cas où le **concentré de Lysoform®** viendrait en contact avec les muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins etc.), et au cas où le produit même **dilué** serait entré en contact avec le **yeux**, rincer immédiatement abondamment à l'eau potable et consulter un médecin. Si les vapeurs du produit concentré ont été **inhalées**, il se peut que les muqueuses soient irritées. Dans ce cas, aérer ou emmener le patient à l'air frais. Si le produit a été **ingéré**: Diluer sans attendre en faisant boire une quantité d'eau importante au patient et consulter un médecin. **Ne pas faire vomir le patient, car cela pourrait provoquer des brûlures dans l'œsophage.**
- Ne pas ajouter de détergents ou de produits de nettoyage usuels à **Lysoform®**: cela risquerait d'inhiber et d'éliminer son action désinfectante.
- Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette ou le prospectus avant l'utilisation

## CONDITIONNEMENT

	Art.-Nr.
20 x 500 ml	6545
12 x 1 litre	6566
2 x 5 litres (jerricans)	6444

## Accessoires:

Pompe doseuse pour jerrican de 5 l (appuyer 1 fois = 20 ml)	3135
---	------

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.  
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –  
Nous vous rappellerons aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0  
CH: 056 - 441 69 81



**Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**  
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin  
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM  
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



**LYSOFORM**  
**Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG**  
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch  
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14  
CHZB2222