



Manuelle Desinfektion & Reinigung

INSTRU PLUS

Flüssigreiniger für Instrumente und Endoskope

- pH-neutral und materialschonend
- Reinigungsstark und frei kombinierbar
- Für Ultraschallbäder



Produktbeschreibung

INSTRU PLUS ist ein besonders materialschonendes Präparat zur gründlichen Reinigung von flexiblen und starren Endoskopen sowie Instrumenten aller Art. Als pH-neutraler, aldehydfreier Reiniger auf Tensidbasis ideal zur Reinigung von flexiblen Endoskopen gem. RKI-Empfehlung geeignet. Darüber hinaus eignet sich das Präparat hervorragend als Zusatzreiniger für unsere Instrumentendesinfektionsmittel wie PERFEKTAN ENDO, PERFEKTAN NEU, PERFEKTAN TB, DESCOTON FORTE, DESCOTON 2 % GDA und DESCOTON EXTRA. Aufgrund seiner exzellenten Materialverträglichkeit und gutem Korrosionsschutz ist es für alle Instrumente aus Metall, Kunststoff, Keramik, Glas, Gummi und Porzellan geeignet. Zur Anwendung im Ultraschallbad geeignet.

Anwendungsgebiete

INSTRU PLUS eignet sich ideal als Instrumentenreiniger sowie Zusatzreiniger für Instrumentendesinfektionsmittel wie DESCOTON FORTE, DESCOTON EXTRA, PERFEKTAN TB, PERFEKTAN ENDO oder PERFEKTAN NEU.

Anwendung

Instrumente, ggf. nach vorheriger Grobreinigung, in die Gebrauchslösung einlegen. Flächen und Hohlräume müssen von der Lösung vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Instrumente gründlich mit Wasser abspülen und weiter aufbereiten.

Anwendungshinweise

Reinigung von Endoskopen und medizinischen Instrumenten:
0,25 % (2,5 g/L). Je nach Verschmutzung bis zu 5 % (50 g/L).

Zusammensetzung

Nichtionische Tenside (5–15%), Konservierungsmittel (Benzalkoniumchlorid).

Materialverträglichkeit

Geeignet für alle medizinische und chirurgische Instrumente. INSTRU PLUS ist freigegeben zum Einsatz mit Instrumenten und Endoskopen folgender Hersteller:
- Pentax GmbH, Hamburg

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.
INSTRU PLUS	Flasche	2 L	6	00-104-020-01
	Kanister	5 L	3	00-104-050

