

DESCO WIPES RT

Vliestücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln

- zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln
- wiederbefüllbares Spendersystem
- optimale Abgabe des Wirkstoffes an die Fläche



CE

PRÄPARATETYP

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten. Die Tücher sind aus qualitativ hochwertigem Vliesstoff. Auf Grund der quervernetzten Vliesstruktur sind **DESCO WIPES RT** sehr strapazierfähig und besonders reißfest.

Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden.

DESCO WIPES RT wurden speziell für die Flächendesinfektion entwickelt. Sie geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine hervorragende Benetzung der zu desinfizierenden Fläche.

DESCO WIPES RT können aus einem eigens dafür konzipierten **DESCO WIPES VLIESTUCHSPENDER** entnommen werden.

Die Entnahme erfolgt aus einem sehr praktikablen, wiederverschließbaren Spendersystem.

Die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt.

DESCO WIPES VLIESTUCHSPENDER

Ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spendereimer aus Polyethylen und Polypropylen. Die Entnahme erfolgt aus einem speziell für diese Anwendung konzipierten, absolut dichten, wiederverschließbaren Tuchspendersystem. Spülmaschinenfest bis 60° C.

ANWENDUNG:

BEFÜLLEN DES DESCO WIPES VLIESTUCHSPENDERS



Ein spezielles Etikett, welches die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum erleichtert, ist jedem Vliestuchspender beigelegt.

ANWENDUNG

1,5 – 2,5 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen).

Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spender-eimer mit 1,5 – 2,5 Litern der Gebrauchslösung des Desinfektionsmittelkonzentrats oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels. Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen. Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!

Neben den Flächendesinfektionsmitteln von Dr. Schumacher können **DESCO WIPES RT** auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Bitte auch Herstellerangaben zur Stabilität der Flächendesinfektionsmittel beachten.

DESCO WIPES RT sind einzeln abreißbar und sollten einzeln aus der Applikationsöffnung entnommen werden. Nachfolgende Tücher sind durch die große Auffangschale mit Deckel des Spendersystems sicher geschützt. Spezielle Etiketten, die die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum des entsprechenden Desinfektions- bzw. Reinigungsmittels erleichtern, sind jeder Vliesrolle beigelegt.

Vliestuchspender nicht unmittelbaren Wärmequellen aussetzen.

Weitere ausführliche Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte unserem separat erhältlichen **DESCO WIPES** Flyer.



DESCO WIPES RT

Vliestücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln

ANWENDUNGSBEREICHE

DESCO WIPES RT können zur Flächendesinfektion und Reinigung in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen; der pharmazeutischen Industrie, in Labors sowie in der Lebensmittelindustrie und Küchen angewendet werden.

Sie sind besonders geeignet für:

- patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Patientenliegen
- alle Arbeitsflächen
- Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluß zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist
- schwer zugängliche Flächen

ZUSAMMENSETZUNG


1 Rolle besteht aus 60 Wischtüchern à 32 cm x 30 cm, trocken, aus hochqualitativem, fusselfreiem Vlies. 100% Kunstfaser.

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	VK-Einheit	PZN	Art.-Nr.
1 Pckg. Desco Wipes RT Rolle à 60 Blatt	6 x 1 Rolle	-	00-915-RR6006
Desco Wipes Vliestuchspender 1 Spendereimer	1 x 1 Eimer	-	00-915-E001
Desco Wipes Vliestuchspender Vorratspackung 6 Spendereimer	6 x 1 Eimer	-	00-915-E002

APPLIKATIONSHILFEN

Einzelpackung	Verkaufeinheit	PZN	Art.-Nr.
Desco Wipes Wandhalter	1 x 1 Halter	-	00-902-EIM

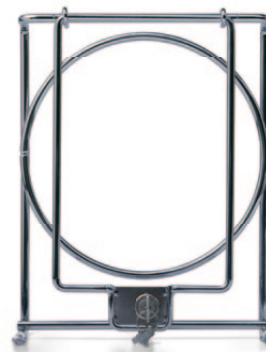

GUTACHTEN

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **CLEANISEPT**, **BIGUANID FLÄCHE N**, **DESCOSEPT AF**, **DESCOSEPT PUR** im **DESCO WIPES SYSTEM** vom 08.11.2006.

Wirksamkeit des **DESCO WIPES TÜCHERSYSTEMS** im quantitativen Flächenversuch mit OP-Fliesen bei Einsatz von **CLEANISEPT**, **BIGUANID FLÄCHE N** vom 08.11.2006.

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von Desomed Rapid AF, Biguamed Perfekt N im **DESCO WIPES SYSTEM**, 12.06.2007.

B.Braun Melsungen AG:

Stellungnahme zur Kompatibilität von B.Braun-Flächendesinfektionsmitteln in Verbindung mit **DESCO WIPES**, 23.04.2007.

PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

VERSCHIEDENE VERSCHLUSSDECKEL:

Sofern Sie für verschiedene Abteilungen oder Produkte unterschiedliche Vliestuchspender verwenden möchten, stehen hierfür Verschlussdeckel in farblichen Varianten zur Verfügung.

