



VAH

IHO

ÖGHMP

Desinfektionstücher

# DESCOCEPT AF WIPES

## Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung durch praktische Spenderdose
- Grundlegende, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von kleinen Flächen im Bereich der Routine



### Produktbeschreibung

DESCOCEPT AF WIPES sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

DESCOCEPT AF WIPES bieten bei der Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen eine zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen und wiederverschließbaren Spenderdose entnehmen.

### Anwendungsgebiete

**Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, medizinischem Inventar und kleinen Flächen aller Art.

**Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten.

### Anwendung

Flächen mit DESCOCEPT AF WIPES bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 s	1 min	2 min	5 min	30 min
<b>Bakterien und Hefen</b>							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung			•		
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		•			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung			•		
<b>Viren</b>							
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•				
	EN 14476	hohe und niedrige Belastung	•				
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung				•	
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV			•			
<b>Ergänzende Prüfergebnisse</b>							
bakterizid	EN 1040		•				
	EN 1276	niedrige Belastung		•			
	EN 13727	niedrige Belastung	•				
		hohe Belastung		•			
	EN 13697	niedrige Belastung		•			
levurozid (Candida albicans)	EN 1275		•				
	EN 1650	niedrige Belastung		•			
	EN 13624	niedrige Belastung		•			
		hohe Belastung		•			
EN 13697	niedrige Belastung		•				
fungizid (Aspergillus brasiliensis)	DGHM	niedrige Belastung					•

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



## DESCOSEPT AF WIPES

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

### Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung:  
3 Monate

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:  
Ethanol 42 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,05 g. Enthält Duftstoffe

### Materialverträglichkeiten

**Konrad Hornschuch AG, Weißbach**  
Freigabe zum Einsatz von DESCOSEPT AF mit Skai® Polstermaterialien.

**Bergé & Co. GmbH, Versmold**

Freigabe zum Einsatz von DESCOSEPT AF mit MM-Desinfektionsmatten.

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### Sicherheits- & Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Größe	Art. Nr.	PZN
DESCOSEPT AF WIPES	Spenderdose	120 Tücher	54	14 x 20 cm	00-312-D120-01	01898486
	Nachfüllbeutel	120 Tücher	12	14 x 20 cm	00-312-R120-01	01898581

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

