


Überleitungsgeräte für Ecobag® click

Ecobag® und marktübliche Beutelsysteme

Länge 210 cm	patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikonschlauch	
mit Ecoclick® Konnektor	Ecoclick® Nr. 1	einläufig
	Ecoclick® Nr. 2	zweiläufig, mit Rasterklemmen
mit Ecospike Einstechdorn	Ecoclick® Nr. 4	einläufig, mit Rücklaufsperr
	Ecospike Nr. 1	einläufig
	Ecospike Nr. 2	zweiläufig, mit Rasterklemmen
	Ecospike Nr. 4	einläufig, mit Rücklaufsperr

Länge 330 cm (Arthros)	patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikonschlauch	
mit Ecoclick® Konnektor	Ecoclick®-Arthros Nr. 1	
mit Ecospike Einstechdorn	Ecoclick®-Arthros Nr. 1	

Länge 330 cm (Arthros)	patientenseitiger Luer-Lock-Anschluss	
mit Ecoclick® Konnektor	Ecoclick®-Arthros Nr. 2	
mit Ecospike Einstechdorn	Ecoclick®-Arthros Nr. 2	

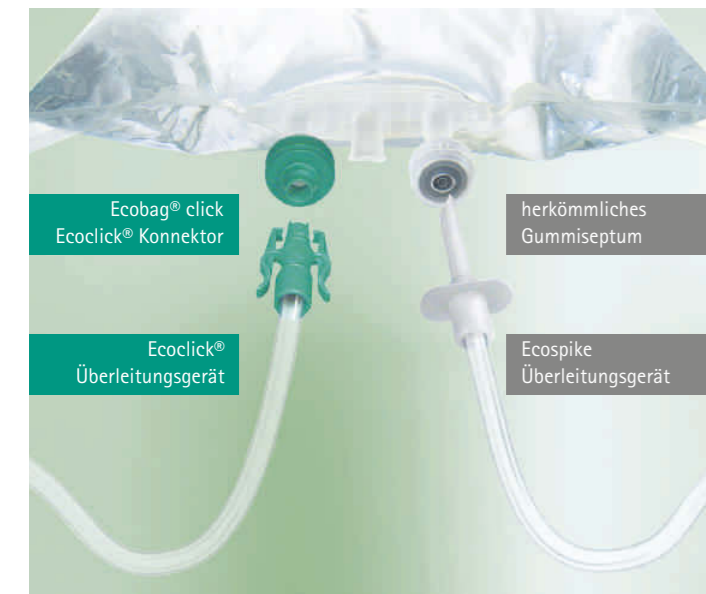

Ecobag® click ist universell einsetzbar

Ein Beutel, zwei Alternativen – durch das Doppelportsystem ist Ecobag® click auch mit herkömmlichen Überleitungsgeräten mit Einstechdorn kompatibel.


Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Das Spüllösungsprogramm in Ecobag® click, Ecolav® und Ecotainer®

Ecolav®	Größe		NaCl 0,9%		Ringer-Lactat		Aqua	
	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
	100 x 30 ml	3570310	4454809	3570490	6062657			
	20 x 100 ml	3570350	4454815	3570500	6062663	387872	0202608	
	20 x 250 ml	3570380	4463636			387873	0202614	
	10 x 500 ml	3570410	4499344	3570510	6062686	387874	0202620	
	10 x 1.000 ml	3570440	4499367			387875	0202637	
	Estericlean® 10 x 500 ml	3570470	6063059					
Ecotainer®	Größe		NaCl 0,9%		Ringer		Aqua	
	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
	10 x 500 ml	3570130	6063036	3570010	6062628	0082423E	0088986	
	6 x 1.000 ml	3570160	6063042	3570030	6062634	0082479E	0088992	
Ecobag® click	Größe		NaCl 0,9%		Ringer		Glycine 1,5%	
	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
	4 x 3.000 ml	FREU930	8473643	FREU944	8488886	FREU934	0498336	
	2 x 5.000 ml	FREU970	8473666	FREU984	8488892	FREU974	0498342	
	Größe						Sorbitol / Mannitol 3%	
	4 x 3.000 ml					FREU938	0498419	
	2 x 5.000 ml					FREU978	0498425	
Ecobag® click	Überleitungsgerät mit Ecoclick® Konnektor			Überleitungsgerät mit Ecospike Einstechdorn				
	Typ (je 25 Stück)	REF	PZN	Typ (je 25 Stück)	REF	PZN		
	Ecoclick® Nr. 1	2112269	0498632	Ecospike Nr. 1	2112268	0498603		
	Ecoclick® Nr. 2	2112271	0498649	Ecospike Nr. 2	2112270	0498626		
	Ecoclick® Nr. 4	2112272	1795734	Ecospike Nr. 4	3806073	0949974		
	Ecoclick® Arthros Nr. 1	2112277	0498572	Ecospike Arthros Nr. 1	3804003	7479661		
	Ecoclick® Arthros Nr. 2	2112279	0498589	Ecospike Arthros Nr. 2	2112278	0498595		

Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Das Spüllösungsprogramm in Ecobag® click, Ecolav® und Ecotainer®

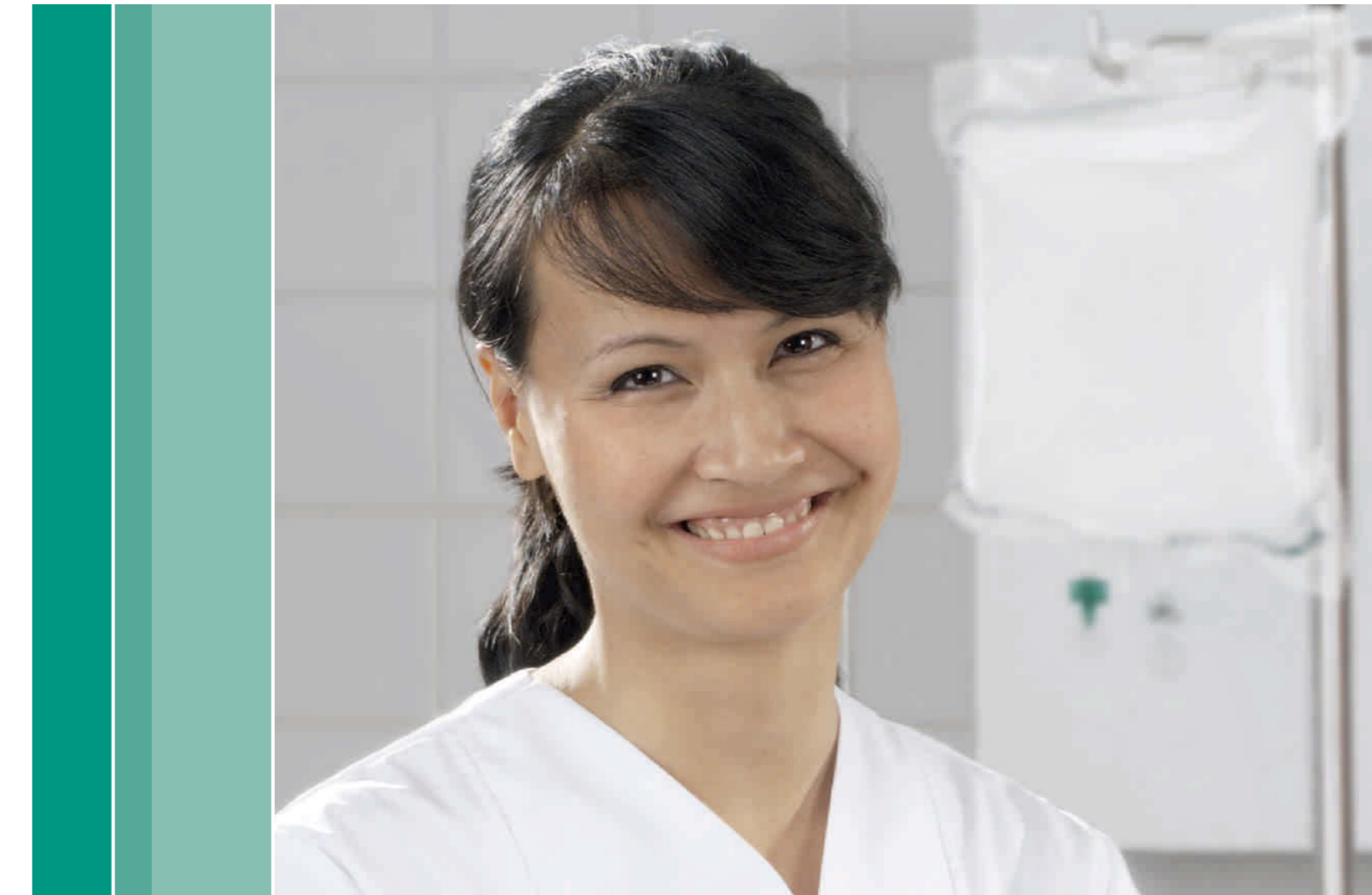

Ecobag® click

Immer die beste Verbindung ... passt sich jeder Bewegung an



Portsystem durch Abdrehen der Verschlusskappe öffnen.

Ecoclick®-Konnektor bis zur Rastung in den Port drücken.

Zum Dekonnektieren Seitenflügel drücken und Ecoclick® herausziehen.

Spüllösungsbeutel mit innovativem Verschlusssystem: leichtes Konnektieren und 360° Beweglichkeit

Nur ein kurzes Klicken und der Ecobag® click ist angeschlossen. Fest und kontaminationsicher. Der flexible, drehbare Kopf der Ecoclick®-Überleitungsgeräte passt sich jeder Bewegung an und erleichtert so die Handhabung. Ein Verhaken oder Verklemmen des Schlauches wird vermieden. Und mit einem leichten Druck auf die Seitenflügel wird der Verschluss wieder gelöst. Der Port verschließt sich sofort vollständig.



- Komfortables Handling durch 360° flexiblen Drehkopf
- Leichte und sichere Arretierung des Überleitungsgerätes im Portsystem
- Wiederabdichtende Ports

Ecolav®

Mit sanftem Druck präzise spülen ... und dabei Zeit und Kosten sparen



Druckanwendung: Ein geringer Druck auf die weiche Flasche bewirkt einen feinen, präzisen Strahl der Spüllösung.

Punkt förmige Anwendung: Der 30-ml-Minidosis-Behälter erlaubt eine auf den Punkt genaue Anwendung der Spüllösung.

Ecolav® Estericlean® (500 ml): Speziell für die Chirurgie mit steriler Umverpackung.

Flexibler Spülbehälter für punktgenaue, effiziente Anwendungen

Das weiche Material des Ecolav®-Behälters (Polyethylen) und der Spülkonus ermöglichen eine punktgenaue Spülung durch sanften Druck der Flasche.

Aufgrund der verschiedenen Behältergrößen ist Ecolav® für viele Anwendungsgebiete geeignet. Durch die abdrehbare Verschlusskappe wird sofort mit der Anwendung begonnen – ohne Spritze, ohne Nierenschale.



- **Zeitersparnis:** Reduzierter Vorbereitungsaufwand, Verschluss abdrehen, sofort verwenden
- **Kostensparnis:** Ohne zusätzlichen Materialeinsatz anzuwenden

Ecotainer®

Alles im Griff ... mit Sicherheit

Ecotainer® für großvolumige Spüllösungen: sichere Handhabung, kein Verschütten beim Ausgießen

Ecotainer® besteht aus unzerbrechlichem, umweltfreundlichem Polypropylen. Er wurde so konzipiert, dass ein Verschütten des Inhalts unabhängig vom Ausgusswinkel nicht möglich ist. So können auch großvolumige Spüllösungen zielgenau dosiert werden.

Durch die Griff-Taille liegt der Behälter immer fest in der Hand. Besondere Sicherheit bietet der Ecotainer® aufgrund der verschieden farbigen Verschlusskappen, die eine schnelle und sichere Zuordnung der unterschiedlichen Spüllösungen ermöglichen:

- Ringer
- NaCl 0,9%
- Aqua B. Braun



Die farbcodierten Verschlusskappen sind leicht zu öffnen. Und der weiße Versiegelungsring ist eine sichtbare Garantie für die Originalität der Spüllösung.

Die spezielle Form des Ecotainers hilft, dass beim Ausgießen der Spüllösung kein Tropfen daneben geht – auch bei voll gefülltem Behälter und steilem Ausgusswinkel. Zusätzlich sorgt die Messkala für eine exakte Dosierung je nach Anwendungsgebiet.

- Ermöglicht eine genaue Dosierung
- Liegt besonders gut in der Hand
- Ermöglicht eine eindeutige Zuordnung der unterschiedlichen Spüllösungen durch farbcodierte Verschlusskappen