


Curapor® transparent

Chirurgischer Wundverband, steril



Curapor® transparenter Wundverband, steril

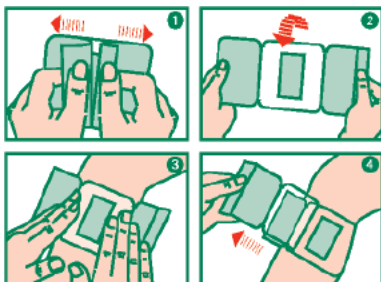

Curapor® transparenter Wundverband, steril ist leicht zu applizieren:

- 1 Einfach das Abdeckpapier aufschlagen und auseinanderziehen ...
- 2 ... Produkt umdrehen ...
- 3 ... sanft an der gereinigten Haut andrücken ...
- 4 ... die Stützfolie abziehen – fertig!

Anwendungsbereiche

- zur sterilen Versorgung von postoperativen Wunden, Unfallverletzungen sowie kleinen Schnitt- und Schürfwunden
- für die minimalinvasive Chirurgie
- zum Schutz vor Sekundärinfektionen
- als Abdeckung beim Duschen und Schwimmen

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- transparent und wasserdicht
- atmungsaktiv
- bakterienundurchlässig
- beständig gegen gängige Desinfektionsmittel
- haftet sicher und passgenau
- lässt sich rückstands- und schmerzarm entfernen
- geringes Risiko, mit der Wunde zu verkleben
- auch für empfindliche Haut gut geeignet

Produktzusammensetzung

Trägerfolie: 100 % Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
 Wundkissen: Saugschicht aus Viskose/Polyester, Polyester-/Polyethylen-Wundkontaktschicht

Hinweise

Die Größen 7 x 5 cm und 10 x 8 cm haben abgerundete Ecken

Curapor® transparent

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
7 x 5	4,0 x 2,5	13099	02913124	5/120	SSB, EV
10 x 8	6,0 x 4,0	13100	02913555	5/170	SSB, EV
7 x 5	4,0 x 2,5	13101	02913733	50/500	SSB, EV
10 x 8	6,0 x 4,0	13102	02913756	25/200	SSB, EV
15 x 10	11,0 x 5,0	13103	02914098	25/225	SSB, EV
20 x 10	16,0 x 5,0	13104	02914170	25/225	SSB, EV
25 x 10	20,0 x 5,0	13105	02914187	25/225	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 16