

# Hydroaktive Wundversorgung - Infizierte akute und chronische Wunden sanieren

## UrgoTül Silver

Polyestergitter mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix<sup>®</sup> (Ag = Silbersalz)



- Starke und anhaltende antibakterielle Wirksamkeit gegen ein breites Keimspektrum (gramnegative und grampositive Bakterien), u.a. Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa
- Lokale Freisetzung der Silberionen nur in Kontakt mit dem Wundexsudat
- Gute lokale Verträglichkeit
- Sehr flexibel und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete:

Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion: akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, chirurgische Wunden) und chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera)

### Anwendung:

- UrgoTül Silver kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen.
- UrgoTül Silver mit einem Sekundärverband abdecken, z.B. mit sterilen Kompressen, die mit einer dehnbaren Binde (z.B. Urgomull haft latexfrei) oder mit einem großflächigen, dehnbaren Heftpflaster (z.B. Urgoderm Stretch) fixiert werden.
- Tragedauer 1 bis 3 Tage
- Die maximale Behandlungsdauer mit UrgoTül Silver beträgt einen Monat.



### Kontraindikationen:

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.

PZN	REF	Artikel	Abmessungen	Sp.std.bed.
05 046 461	509360	OP à 10 Stück	5 x 5 cm	ja/nein *
01 686 904	518515	Spender à 60 Stück	5 x 5 cm	ja/nein *
04 667 356	507588	OP à 10 Stück	10 x 12 cm	ja/nein *
06 607 909	517590	Spender à 60 Stück	10 x 12 cm	ja/nein *
04 667 362	507591	OP à 5 Stück	15 x 20 cm	ja/nein *

\* ist nicht in allen KV-Bezirken als Sprechstundenbedarf erstattungsfähig

Weiter UrgoClean Ag Vlieskomresse aus antimikrobiellen und hydrosreinigenden Polyacrylatfasern mit mikroadhäsiver TLC-Ag-Wundheilungsmatrix<sup>®</sup> (Ag = Silbersalz)

zu: UrgoClean Ag-UrgoStart-Set Therapie-Set für exsudierende chronische/chronifizierte traumatische Wunden mit initialem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion

UrgoCell Silver Absorbierende, nicht haftende Polyurethan-Schaumstoffkomresse mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix<sup>®</sup> (Ag = Silbersalz) und atmungsaktivem Vliesstoffträger aus Polyurethan

UrgoCell Ag Border Absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkomresse mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix<sup>®</sup> (Ag = Silbersalz), atmungsaktivem Vliesstoff-Träger aus Polyurethan und hautverträglichem Haftrand

UrgoTül Silver Polyestergitter mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix<sup>®</sup> (Ag = Silbersalz)

UrgoTül Silver-Start-Set Therapie-Set für chronifizierte traumatische/chronische Wunden mit initialem

Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion

UrgoTül Ag Lite Border Polyestergitter mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix<sup>®</sup> (Ag = Silbersalz), dünner absorbierender Kompresse, atmungsaktivem Vliesstoff-Träger aus Polyurethan und hautverträglichem Haftrand

UrgoTül S.Ag Polyestergitter mit TLC-Wundheilungsmatrix<sup>®</sup> + Silber-Sulfadiazin

UrgoSorb Silver Calciumalginat mit CMC (Carboxymethylcellulose) und Silberkomplex



© 2020 - URGO GmbH - Alle Rechte vorbehalten

URGO GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 16 - 66280 Sulzbach - Deutschland

Tel.: +49 (0)6897 / 579-0 - Fax: +49 (0)6897 / 579-212