


Stülpa[®]-fix

Anleitung zur Verbandfixierung
mit Netzverbänden

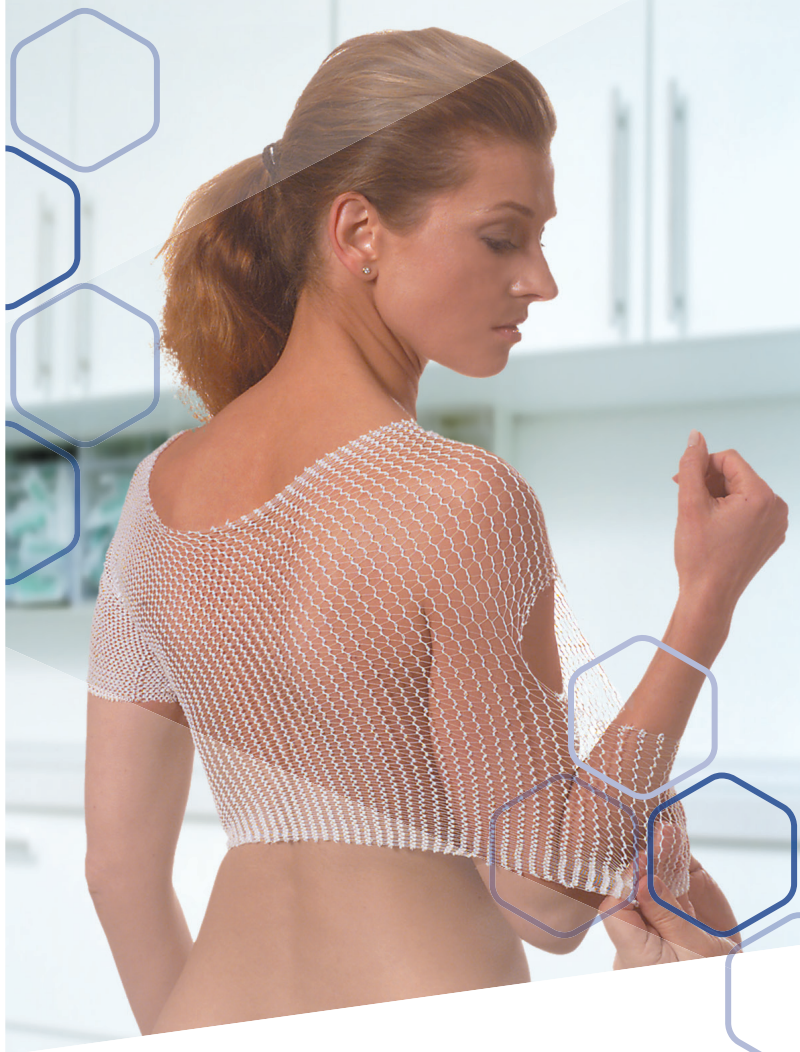

Wichtiges über Stülpa®-fix

Stülpa-fix ist ein hochelastischer, weitmaschiger Netzschlauchverband zur schnellen Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen. Selbst komplizierte Verbände sind mit wenigen Handgriffen einfach anzulegen. Stülpa-fix kann für Fixierverbände aller Art und Größe angewendet werden. Dabei darf die Größe nicht zu eng gewählt werden, um Einschnürungen zu vermeiden.

Aufgrund der hohen Elastizität und der guten Rückstellkraft sitzen Stülpa-fix-Verbände sicher und faltenlos, ohne einzuschnüren; sie rutschen nicht und leiern nicht aus. Zum Auswechseln der Wundauflage braucht der Fixierverband nicht gewechselt zu werden.

Stülpa-fix kann an jeder beliebigen Stelle und in jeder Richtung durchtrennt oder eingeschnitten werden, ohne weiterzureißen oder auszufransen.

Der hohe Baumwollanteil sorgt für eine gute Hautverträglichkeit. Stülpa-fix ist unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß und kann dampf-sterilisiert werden.

In der vorliegenden Fibel sind die Anleitungen für die gebräuchlichsten Verbände enthalten.



Inhalt

Wichtiges über Stülpa-fix	2
Alle Größen auf einen Blick	4
Finger-/Mehrfingerverband	6
Handverband	8
Armverband/Beinverband	9
Fußverband	10
Kopfverband	12
Schulterverband	14
Mammaverband	16
Rumpfverband.....	18
Oberschenkelverband/Hüftverband.....	19

Alle Größen auf einen Blick

Stülpa®-fix-Rollen

- Gr. 1 Fingerverbände
- Gr. 2 Mehrfingerverbände, Kinderhand
 und Armverbände
- Gr. 3 Hand- und Armverbände,
 Kinderkopfverbände
- Gr. 4 Bein- und Fußverbände,
 Kinderrumpfverbände
- Gr. 5 Kopfverbände, Kinderrumpfverbände
- Gr. 6 Rumpfverbände
- Gr. 7 Große Rumpfverbände





Finger-/Mehrfingerverband

Abmessung:

Je nach Fingergröße u. -anzahl
Stülpa-fix Gr. 1 oder Gr. 2,
ca. 30–35 cm

Version 1

Stülpa-fix zu etwa einem Viertel über den bzw. die betreffenden Finger streifen, Schlauchrest einmal drehen



und über die Hand bis zum Handgelenk stülpen, an der Handinnenfläche ca. 5 cm einschneiden



und unverbundene Finger durch die Öffnung des Verbandes stecken.



Abmessung:

Je nach Fingergröße u. -anzahl
Stülpa-fix Gr. 1 oder Gr. 2,
ca. 20–25 cm

Version 2

Stülpa-fix etwa zur Hälfte über
den bzw. die Finger streifen,
Schlauchrest einmal
drehen



und über den bzw. die Finger
zurückschlagen.



Handverband

Abmessung:

Stülpa-fix Gr. 3, ca. 40–45 cm

Stülpa-fix etwa zur Hälfte über die Hand streifen, Schlauchrest einmal drehen und bis zum Handgelenk stülpen,



an der Handinnenfläche in Höhe des Daumenansatzes ca. 2 cm einschneiden



und Daumen durch die Öffnung des Verbandes stecken.




Armverband/Beinverband

Abmessung: Je nach Armumfang/Beinumfang
Stülpa-fix Gr. 3 oder Gr. 4,
ca. 20–30 cm

Armverband

Stülpa-fix (der Verband sollte die Wundauflage auf jeder Seite etwa 10 cm überdecken), mit beiden Händen dehnen

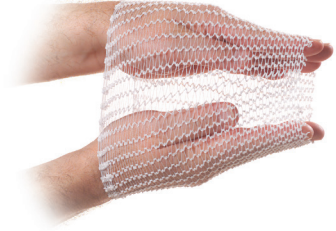

und über den Arm führen.



Hände nacheinander aus dem Netzschlauch ziehen.



Beinverband

Der Beinverband wird analog dem Armverband angelegt.



Fußverband

Abmessung:

Je nach Fußgröße Stülpa-fix
Gr. 3 oder Gr. 4, ca. 40–50 cm

Von Stülpa-fix etwa ein Drittel
des Schlauchs über die Zehen
streifen,



Schlauchrest einmal drehen,



über den Fuß bis oberhalb des
Sprunggelenks stülpen,



Verband an der Ferse dehnen,
abschneiden



und so die Ferse freilegen.



Kopfverband

Abmessung:

Je nach Kopfgröße Stülpa-fix
Gr. 4 oder Gr. 5, ca. 50–60 cm

Von Stülpa-fix etwa ein Drittel
des Schlauchs mit beiden
Händen dehnen und über den
Kopf bis zum Haaransatz
führen,





Schlauchrest dehnen, ein- bis
zweimal drehen und über den
Kopf bis zum Halsansatz
stülpen,



Verband in Augenhöhe ab-
heben, ca. 10 cm waagrecht
einschneiden



und so das Gesicht freilegen.

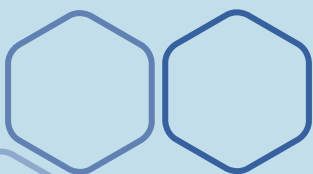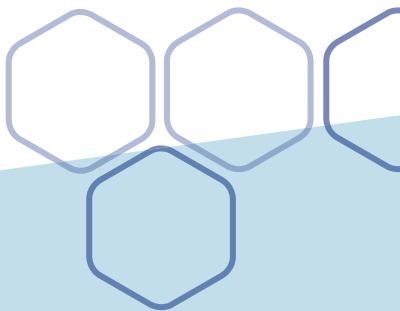

Schulterverband

Abmessung:

Je nach Brustumfang Stülpa-fix
Gr. 6 oder 7, ca. 45–50 cm

Schulterverband

Stülpa-fix in der Hälfte 3–4 cm
einschneiden,



den Schlauch mit dem
Einschnitt nach oben über
den Arm bis zur Schulter
streifen,



Verband stark auseinander
ziehen, gedehnten Einschnitt
über den Kopf führen,



den Arm durchstecken,



und den Verband
positionieren.



Mammaverband

Abmessung:

Je nach Brustumfang Stülpa-fix
Gr. 6 oder 7, ca. 55–60 cm

Stülpa-fix nach 25 cm etwa
2 cm waagrecht einschneiden,



den Schlauch mit dem
Einschnitt nach oben über
den Arm bis zur Schulter
streifen,



Verband stark auseinander
ziehen, gedehnten Einschnitt
über den Kopf führen,
Schlauchrest über Schulter
und Oberarm ziehen,



in Achselhöhe waagrecht ca.
10 cm einschneiden



und den Arm durch die
Öffnung stecken.



Rumpfverband

Abmessung:

Je nach Brustumfang Stülpa-fix
Gr. 6 oder Gr. 7, ca. 45–50 cm


Stülpa-fix mit beiden Händen
dehnen und über den Ober-
körper führen,



Verband auf beiden Seiten
in Achselhöhe waagrecht
ca. 10 cm einschneiden



und die Arme durch die
Öffnung stecken.

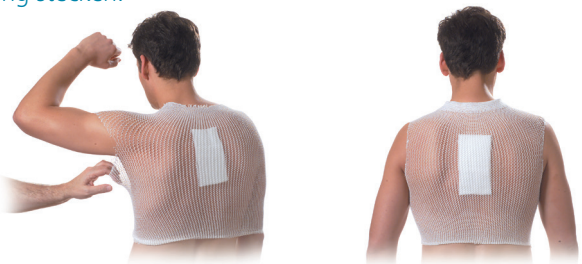

Oberschenkel- und Hüftverband

Abmessung:

Je nach Umfang Stülpa-fix
Gr. 6 oder Gr. 7, ca. 45–50 cm

Stülpa-fix bei etwa 1/3 Länge
3-4 cm einschneiden.



Eine Hand von oben in das
lange, die andere in das
kurze Schlauchstück
einführen und den Verband
dehnen,



langes Schlauchstück über das
verletzte und kurzes Schlauch-
stück über das andere Bein
führen. Verband bis zur Hüfte
hochziehen.



PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Deutschland

PAUL HARTMANN Ges. mbH
2355 Wiener Neudorf
Österreich

IVF HARTMANN AG
8212 Neuhausen
Schweiz

Besuchen Sie uns im
Internet unter
www.hartmann.de

B 11 086 311/8 (03/16)



**Gesundheit ist
unser Antrieb**